

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

ALKOHOLFREIE TÜCHER ZUR SCHNELLDESINFEKTION

1 / 8

**Universelle, komfortable und zeitsparende
Anwendung** im gewohnten Vliestuchspender
Grundlegende, **schnelle Wirksamkeit**
Besonders geeignet zur Desinfektion
von großen Flächen im Bereich der Routine



FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 8

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art im Bereich der Routine.

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES bieten bei der Desinfektion und Reinigung von großen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen

sich einzeln aus dem gewohnten Vliestuchspender mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen. Jedem Nachfüllpack liegt unser ULTRASOL OXY SACHET bei, welches eine KRINKO-gerechte Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders ermöglicht.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR)

Schnell-desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

Anwendungsgebiete gemäß EU-Medizinprodukteverordnung

Schnell-desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nicht-invasiven Medizinprodukten.

Anwendung

Flächen mit DESCOCEPT SPEZIAL WIPES bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.
Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 0,5 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Materialverträglichkeit

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf Oberflächen und Medizinprodukten. (siehe Seite 4 – 7)

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

WIRKUNGSSPREKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 8



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			1 min	2 min
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion				
bakterizid ¹ , levurozid ¹	VAH/EN ²	mit Mechanik, hohe Belastung	•	
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	•	
Ergänzende Prüfergebnisse				
bakterizid	EN 16615	hohe Belastung	•	
	EN 13727	hohe Belastung	•	
	EN 1276	hohe Belastung	•	
levurozid (C. albicans)	EN 16615	hohe Belastung	•	
	EN 13624	hohe Belastung	•	
	EN 1650	hohe Belastung	•	
wirksam gegen Papova/SV40 - Viren	EN 14476	hohe Belastung		•

¹ – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

² – EN 13624, EN 13727, EN 16615

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

4 / 8



MATERIAL METALLE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Edelstahl V2A			•	Medizinische Transportstühle
			•	Transportwagen
			•	Rollatoren
Aluminium			•	
Messing	•			Stethoskop (Messing verchromt)
Kupfer	•			

DESCOSEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

5 / 8



MATERIAL KUNSTSTOFFE: ELASTOMERE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PUR (Polyurethan)			•	Medizinische Transportstühle
			•	Armaturenbletter
Silikon			•	Gesichtsmasken
			•	Open-Cuff Gesichtsmaske
			•	Medizinische Tastaturen und Mäuse
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)			•	Pflegewagen
CR (Chloropren-Kautschuk)			•	

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

6 / 8



MATERIAL KUNSTSTOFFE: THERMOPLASTE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PA (Polyamid)			•	Röntgenschürzen
PE-HD (Polyethylen-High Density)			•	Lager- und Transportbehälter
PVC (Polyvinylchlorid)			•	
PMMA (Polymethylmethacrylat)			•	Acryl- und Plexiglas, Inkubatoren
POM (Polyoxymethylen)			•	Sitzschalen
PSU (Polysulfon)			•	
EPP (expandiertes (geschäumtes) Polypropylen))			•	Faszienrollen
PC (Polycarbonat z.B. Makrolon)	•			Perfusoren
	•			Ultraschallgeräte
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer)	•			Röntgengeräte
	•			Patientenüberwachungsmonitore

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

7 / 8



MATERIAL TEXTILIEN				ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	
Kunstleder (z.B. mit PVC und PUR-Deckschicht)				• Untersuchungs- und Behandlungsliegen • Lagerungshilfen • Gynakologischer Untersuchungsstuhl • Dentalstühle • OP-Liegen • Patiententransportliegen

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

GEBINDE

8 / 8

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Tuchgröße	Art. Nr.	PZN
DESCOCEPT SPEZIAL WIPES	Vliestuchspender	1	100 Tücher	30 x 32 cm	00-208-ERS100-01	-
	Nachfüllpack	2	100 Tücher	30 x 32 cm	00-208-RS100-01	12410967
	Wandhalterung	1	-	-	00-902-EIM	-

Die Verfügbarkeit der Produkte und Gebinde ist abhängig von einer erfolgten nationalen Registrierung.



ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:
<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001,
verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.